

Calprotectin Biohit

نمایندگی انحصاری
Biohit

روش انجام آزمایش calprotectin به صورت شماتیک

نمونه	سرم کنترل	استاندارد	محلول	
۱۰۰ لاندا	۱۰۰ لاندا	۱۰۰ لاندا	محلول از محلول رقیق شده	۱۰۰ لاندا محلول رقیق شده
پلیت را به مدت ۴۵ دقیقه در دمای اتاق و در روی شیکر انکوبه نمایید.				۴۵ دقیقه انکوبه
با استفاده از محلول شستشو پلیت را ۳ بار شستشو دهید که در هر بار ۳۰۰ لاندا از محلول شستشو داخل چاهک ها بریزید.				۳ بار شستشو در هر بار ۳۰۰ لاندا محلول
۱۰۰ لاندا	۱۰۰ لاندا	۱۰۰ لاندا	محلول آنزیم کونژوکه	۱۰۰ لاندا محلول کونژوکه
پلیت را به مدت ۴۵ دقیقه در دمای اتاق و در روی شیکر انکوبه نمایید.				۴۵ دقیقه انکوبه
با استفاده از محلول شستشو پلیت را ۳ بار شستشو دهید که در هر بار ۳۰۰ لاندا از محلول شستشو داخل چاهک ها بریزید.				۳ بار شستشو در هر بار ۳۰۰ لاندا محلول
۱۰۰ لاندا	۱۰۰ لاندا	۱۰۰ لاندا	محلول رنگزا (محلول ۱۲ میلی لیتر زرد رنگ)	۱۰۰ لاندا محلول رنگزا
پلیت را به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه نمایید.				۲۰ تا ۳۰ دقیقه انکوبه
۱۰۰ لاندا	۱۰۰ لاندا	۱۰۰ لاندا	محلول STOP (۱۲ میلی لیتر)	۱۰۰ لاندا محلول STOP
با استفاده از فیلتر ۴۰۵ خوانش را انجام دهید.				